



CURATEC® HIDROCOLÓIDE

Estéril - Esterilização por Radiação Gama

Instruções de uso:

DESCRIÇÃO E AÇÃO

Curatec® Hidrocolóide é composto por uma camada interna autoadesiva contendo hidrocolóide (CMC-carboximetilcelulose sódica), poli-isobutileno, conservantes e uma camada externa de filme de poliuretano. Quando em contato com o exsudato da ferida há a formação de um gel, que promove o desenvolvimento de um ambiente úmido otimizando o processo de cicatrização da ferida e permitindo a troca do curativo sem causar danos ao tecido recém-formado. **Curatec® Hidrocolóide** permite a absorção do exsudato, ocorrendo alteração da cor do curativo para uma coloração esbranquiçada, indicando a necessidade de troca.

INDICAÇÕES

Hidrocolóide Standard - pode ser utilizado como curativo primário ou secundário, em feridas com leve à moderada exsudação, como abrasões, escoriações, úlceras nos membros inferiores (venosas, arteriais e mistas), úlceras por pressão (tratamento e prevenção), queimaduras de 2º grau, áreas doadoras e feridas cirúrgicas.

Em feridas superficiais, usá-lo como curativo primário. Em feridas profundas, preencher a cavidade com curativo apropriado e aplicar o Hidrocolóide como curativo secundário.

Hidrocolóide Extrafino - pode ser utilizado como curativo primário ou secundário, em feridas com leve exsudação, como abrasões, escoriações, úlceras nos membros inferiores (venosas, arteriais e mistas), úlceras por pressão (tratamento e prevenção), queimaduras de 2º grau, áreas doadoras e feridas cirúrgicas.

Em feridas superficiais, usá-lo como curativo primário. Em feridas profundas, preencher a cavidade com curativo apropriado e aplicar o Hidrocolóide como curativo secundário.

CONTRAINDICAÇÕES

Pacientes com conhecida sensibilidade à composição do produto.

PRECAUÇÕES

O uso de **Curatec® Hidrocolóide** não é recomendado em queimaduras de 3º grau e em pacientes com histórico de reações alérgicas. Caso apareçam sinais de infecção, como odor característico, alteração na cor do exsudato, febre ou celulite (sensibilidade ao toque e eritema na área da ferida) deve-se procurar orientação médica.

É necessário ter cuidado com o curativo **Curatec® Hidrocolóide** no momento de mudança de decúbito do paciente.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- 1 - Irrigar a lesão com jatos de solução fisiológica a 0,9%;
- 2 - Remover o excesso de exsudato e tecidos desvitalizados, se necessário;

- 3 - Secar somente a região periférica;
- 4 - Escolher o tamanho e/ou apresentação de **Curatec® Hidrocolóide** que melhor se adapte, excedendo a ferida em, pelo menos, 3 cm;
- 5 - Colocar o curativo sobre a ferida, modelando-o e fixando-o;
- 6 - Pressionar levemente o curativo com as mãos para garantir uma maior durabilidade (conceito de adesivo por pressão);
- 7 - Descartar qualquer porção de curativo não utilizada;
- 8 - Poderá ser usado por até sete dias. Se houver extravasamento de exsudato e/ou gel, ou desprendimento das bordas, o curativo deverá ser trocado.

ATENÇÃO: O uso do curativo **Curatec® Hidrocolóide** deve ser supervisionado por um profissional de saúde.

TROCA DO CURATIVO E REMOÇÃO

- Levantar uma extremidade do curativo e, delicadamente, removê-lo pressionando a pele adjacente para evitar traumas ao tecido. Caso seja observada qualquer dificuldade em remover o curativo, o uso de substâncias oleosas como AGE ou óleo mineral podem facilitar a remoção;
- Limpar a ferida antes da aplicação do novo curativo;
- O período máximo de uso, se não houver descolamento ou extravasamento de exsudato, é de sete dias.

VALIDADE

Prazo de validade de dois anos, mantendo o produto armazenado à temperatura ambiente e com embalagem intacta. Esta não pode estar aberta, rasgada, perfurada ou molhada.

APRESENTAÇÕES

- 1,7cm x 6,5cm (standard);
- 3cm x 5,5cm oval (standard);
- 3cm x 6cm (standard);
- 6cm x 6cm (standard);
- 7cm x 9cm oval (standard);
- 10cm x 5cm (extrafino);
- 10cm x 10cm (standard e extrafino);
- 10cm x 12cm oval (standard);
- 10cm x 13cm triangular (standard);
- 10cm x 15cm (standard);
- 14cm x 17cm oval (standard);
- 15cm x 15cm (standard e extrafino);
- 15cm x 18cm triangular (standard);
- 15cm x 20cm (standard e extrafino);
- 20cm x 5cm (extrafino);
- 20cm x 20cm (standard e extrafino).

Número de lote, data de fabricação e prazo de validade: vide cartucho ou envelope.
Atendimento ao consumidor SAC: (12) 3202-1300 - sac@curatec.com.br



Fabricado por:

LM Farma Indústria e Comércio Ltda

R. Jaguarão, 95 - Chácaras Reunidas - São José dos Campos-SP
Indústria Brasileira

Resp. Técnico: Nesser Cristiano de Paula Oliveira - CRF-SP: 38.464

Registro na ANVISA/MS nº: 80246910002

www.curatec.com.br