



CURATEC® HIDROCOLÓIDE PLUS

Estéril - Esterilizado por Radiação Gama

Instruções de uso:

DESCRIÇÃO E AÇÃO

O curativo **Curatec® Hidrocolóide Plus** é composto por uma camada interna autoadesiva hipoalergênica, contendo hidrocolóide (CMC-carboximetilcelulose sódica), poli-isobutileno e conservantes, uma camada externa de filme de poliuretano e um liner, composto por papel siliconado. Quando em contato com o exsudato da ferida, a matriz elastomérica é capaz de absorvê-lo, formando um gel que promove o desenvolvimento de um meio úmido otimizando o processo de cicatrização da ferida e permitindo a troca do curativo sem causar danos ao tecido recém-formado. A camada externa é permeável a gases e vapores de água, porém funciona como barreira oclusiva perante líquidos e micro-organismos ao mesmo tempo que proporciona uma barreira mecânica à ferida.

INDICAÇÕES

Curatec® Hidrocolóide Plus é indicado para o tratamento de feridas com leve a moderada exsudação, como abrasões e lacerações superficiais, rachaduras da pele, úlceras de perna (venosas, arteriais e mistas), úlceras diabéticas e por pressão (parcial e total), prevenção de úlceras por pressão, excisões dermatológicas, áreas doadoras, incisões cirúrgicas e feridas externas causadas por traumas. **Curatec® Hidrocolóide Plus** também é indicado para a prevenção de feridas

CONTRAINDICAÇÕES

O uso do curativo de hidrocolóide não é recomendado em queimaduras de terceiro grau, em pacientes com histórico de reações alérgicas aos componentes da formulação, feridas infectadas e quando houver ossos, tendões e músculos expostos.

PRECAUÇÕES

O produto é de uso único, devendo ser descartado depois do uso conforme os procedimentos de manuseio de lixo hospitalar.

Não utilizar o **Curatec® Hidrocolóide Plus** caso a embalagem esteja rompida.

Em caso de alergia, sinais de infecção (odor característico e alteração na cor do exsudato), febre ou sensibilidade ao toque e eritema na área da ferida, suspender o uso e informar o médico ou o enfermeiro.

O uso do curativo **Curatec® Hidrocolóide Plus** deve ser supervisionado por um profissional da saúde.

MODO DE USO

Preparo:

1. Irrigar a lesão com jatos de solução fisiológica a 0,9%.
2. Remover o excesso de exsudato e tecidos desvitalizados, se necessário.
3. Secar somente a região periferida.
4. Escolher o tamanho e/ou apresentação de **Curatec®**

Hidrocolóide Plus que melhor se adapte, excedendo a ferida em pelo menos 3 cm.

Aplicação do curativo:

- 5. Colocar o curativo sobre a ferida, modelando-o e fixando-o.
- 6. Pressionar levemente o curativo com as mãos para garantir uma maior durabilidade (conceito de adesivo por pressão).
- 7. Descartar qualquer porção de curativo não utilizada.

Remoção do curativo:

- 8. Para remover o **Curatec® Hidrocolóide Plus**, levantar uma extremidade do curativo e, delicadamente, removê-lo pressionando a pele adjacente para evitar traumas ao tecido;
- 9. Limpar a ferida antes da aplicação do novo curativo.

Intervalos de troca:

Curatec® Hidrocolóide Plus deve ser trocado se houver extravasamento de exsudato e/ou gel, desprendimento das bordas, ou deslocamento do curativo

Curatec® Hidrocolóide Plus pode permanecer na ferida por até sete dias, dependendo da quantidade de exsudato. A necessidade da frequência da troca deve ser avaliada pelo profissional de saúde.

ARMAZENAMENTO E VALIDADE

O produto deve ser armazenado e transportado em temperatura ambiente, ao abrigo da luz e umidade, mantendo-o na embalagem original e intacta. O prazo de validade de dois anos é válido seguindo essas condições.

APRESENTAÇÕES

Tamanhos (cm x cm)						
Standard		Extrafino	Grade		Bordas	
			extrafino	bordas		
1,7 x 6,5	20 x 20	5 x 10	5 x 7	4 x 6	6 x 6	
3 x 6	10 x 12 oval	5 x 20	5 x 25	15 x 15	6 x 9	
6 x 6	7 x 9 oval	7 x 9	9 x 14	10 x 10	7 x 9 oval	
10 x 10	3 x 5,5 oval	10 x 10	10 x 10	20 x 20	9 x 11	
10 x 12,5	10 x 13 triangular	10 x 12	15 x 15	10 x 20	10 x 10	
10 x 15	15 x 18 triangular	15 x 15	15 x 20	15 x 20	10 x 12	
14 x 15		15 x 20	18 x 20	18 x 20 sacral	14 x 14	
14 x 16		20 x 20	20 x 20		15 x 15	
15 x 15					20 x 20	
15 x 17,5					10 x 13 triangular	
15 x 20					15 x 18 triangular	

PRODUTO DE USO ÚNICO - DESTRUIR DEPOIS DO USO

Número de lote, prazo de validade e método de esterilização: vide cartucho ou envelope.
Atendimento ao consumidor SAC: (12) 3202-1300 - sac@br.urgo.com

Fabricado por:
LM Farma Indústria e Comércio Ltda
R. Jaguarão, 95 - Chácara Reunidas
São José dos Campos - SP
Indústria Brasileira

Curatec®, uma marca do grupo

URGO

Resp. Técnico: Ana Elisa de Almeida Souza – CRF/SP 42.184
Registro na ANVISA/MS nº: 80246910015
www.curatec.com.br

BUL0044
REV05